


Urīna parauga savākšanas trauciņa lietošanas instrukcija

Pirms parauga savākšanas trauciņa lietošanas

- Atver vaļā tikai iepakojuma apakšējo daļu, kura ir marķēta ar “①”.
Augšējā daļa, kurā ir vāciņš, paliek aizvērta.
- Iepakojumu atver pa caurumoto līniju.
- Izņem parauga savākšanas trauciņu.
Nepieskaries trauciņa iekšpusei.

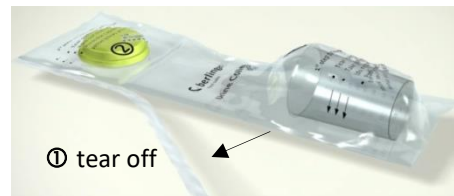


Parauga savākšanas trauciņa uzpildīšana

- Uzpildi parauga savākšanas trauciņu atbilstoši norādēm.



Parauga savākšanas trauciņa aizvēršana

- Novieto trauciņu uz cietas un līdzenas virsmas.
- Atver iepakojuma augšējo daļu, kas ir marķēta ar “②” un izņem zaļo vāciņu.
- Uzliec zaļo vāciņu uz trauciņa.
Uzlīmi uz vāciņa atveres vēl nenoņem!
- Ar plaukstu uzspied uz vāciņa līdz tas ir droši aizvērts.
- Dubultklikšķis liecina, ka vāciņš ir uzlikts pareizi.

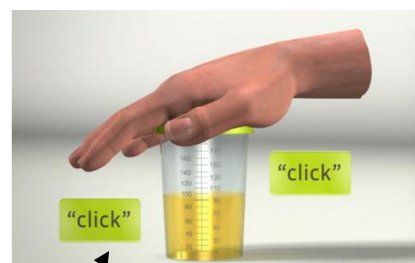

Urīna saliešana

- Pirms urīna pārļiešanas stikla pudelēs, noņem uzlīmi no vāciņa atveres.
- **SVARĪGI:**
Lai viegli pārlietu urīnu no trauciņa stikla pudelēs un izvairītos no izlaistīšanas, atbalsti trauciņa malu pret stikla pudeles kakliņu.
- Turi trauciņu un stikla pudeli leņķī vienu pret otru (skatīt attēlu).

